
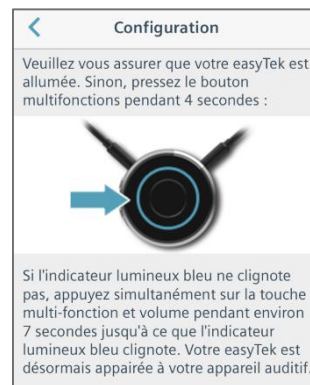


# Guide de prise en main de l'application easyTek

Sous Android : Nécessite Android 4.0.3 ou version ultérieure.

Sous IOS : Nécessite iOS 8.1 ou version ultérieure.




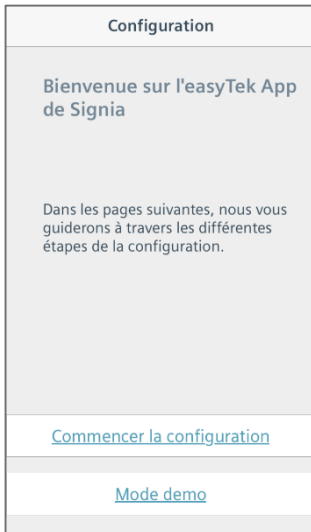


1 - Bienvenue dans l'application

2 - Vous pouvez commencer la configuration ou démarrer en mode démo

3 - Veuillez suivre les indications :

- Allumer easyTek
- Mettre easyTek en mode détection Bluetooth (voyant bleu qui clignote)

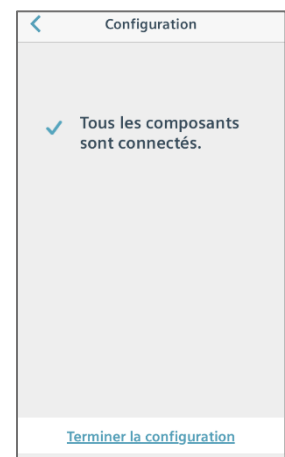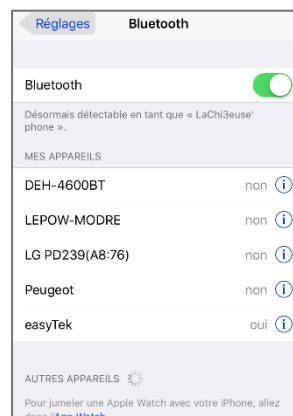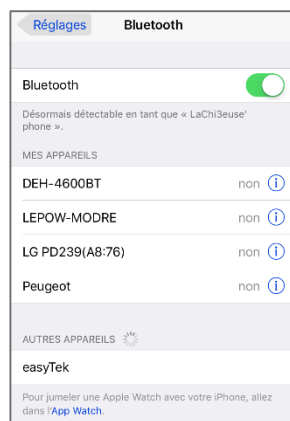
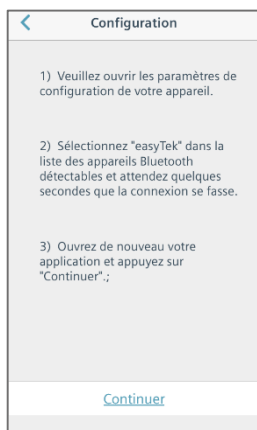


4 - Veuillez suivre les indications :


- Allez dans les réglages Bluetooth du téléphone
- Activez le Bluetooth
- Cliquez sur easyTek

5 - Lorsque l'appairage est réalisé, retournez alors sur l'application et cliquez sur « Continuer »

6 - Une fois easyTek connectée vous pouvez commencer à utiliser votre application

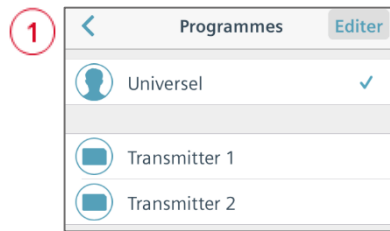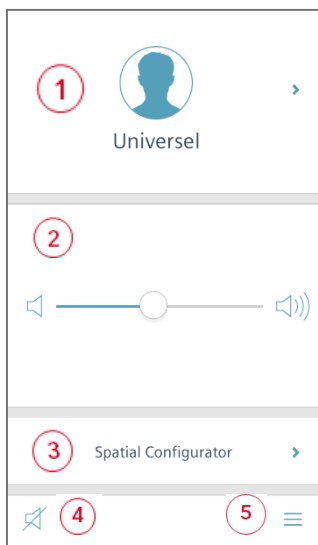

Changement de programmes

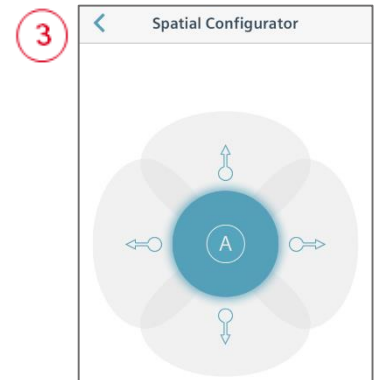


Spatial Configurator



Mise en veille




Menu

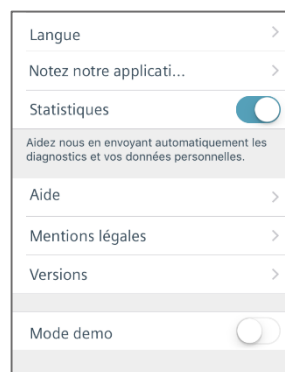

#### Fonctionnalités du Menu :

- SoundBalance : Tonalité Grave/Aigu
- Niveau de pile des appareils auditifs
- Niveau de batterie de la télécommande
- Verrouillage de la télécommande
- Fonctionnalités touchControl : on/off et Réglage du son
- Transmitter : Ajout et suppression de transmitter
- Configuration : Procédure d'appareillage
- Langue : Choix de la langue
- Notez notre application : Donnez une note
- Statistiques : Envoi automatiques des diagnostics
- Aide : Infos, FAQ et Nous contacter
- Mentions légales
- Version appli : Numéro de version
- Mode démo : on/off

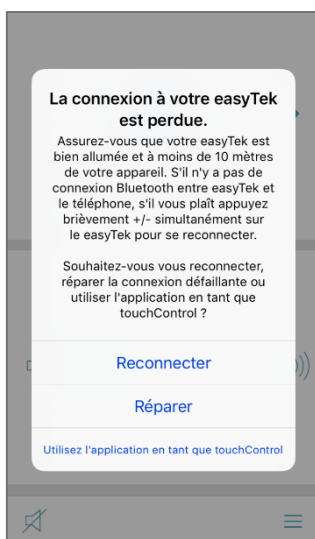

#### Message d'erreur :

- Vérifiez que easyTek est bien allumée
- Vérifiez que le cordon est bien enfoncé
- Reconnecter

Si vous n'avez pas votre easyTek vous pouvez continuer à utiliser l'application avec les fonctionnalités de touchControl.

Les marques, images et symboles Bluetooth® sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG, Inc. Utilisés pas Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les informations de ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans préavis.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Apple Store est une marque déposée de Apple Inc.

Sivantos SAS est titulaire d'une licence de marque Siemens AG. © Signia GmbH, 11. 2016