




# Écrin de charge Styletto

## Prise en main rapide

- Par défaut les LEDs de l'écrin sont éteintes
- Branché à une alimentation (prise secteur ou USB), la LED centrale de l'écrin s'allume automatiquement
  - la LED centrale clignote orange pendant environ 10 mn après chaque branchement, même si l'écrin de charge est complètement chargé
- En charge mobile (non alimenté), un appui court sur le bouton permet de visualiser l'état de charge des aides auditives et de l'écrin de charge pendant 5 secondes (voir ci-dessous "Suite à un appui court sur le bouton")
- Pour éteindre l'écrin de charge, il est nécessaire d'effectuer un appui long sur le bouton (plus de 6 secondes)
  - Lorsque l'écrin de charge s'éteint, la LED centrale clignote en rouge pendant 10 secondes
  - Attention, lorsque l'écrin est éteint, la fonction On/Off pour les appareils est elle aussi éteinte

### Écrin de charge branché à une alimentation




#### LED centrale : état de charge de l'écrin de charge

-  Orange clignotant : batterie interne de l'écrin en cours de charge
-  Vert : écrin de charge complètement chargé
-  Voyant éteint : phase de refroidissement. Reprise de la charge lorsque l'écrin a refroidi





### Suite à un appui court sur le bouton, affichage pendant 5 s.

#### LEDs latérales : état de charge des aides auditives

-  Vert clignotant : aides auditives en cours de charge
-  Vert : aides auditives complètement chargées
-  Voyant éteint : aucune aide auditive dans le chargeur, aide auditive mal placée ou chargeur éteint



#### LED centrale : état de charge de l'écrin de charge

-  Vert clignotant : la batterie interne a une autonomie suffisante pour assurer la charge mobile complète des deux aides auditives
-  Orange : la batterie interne n'a pas une autonomie suffisante pour assurer une charge complète des deux aides auditives

